

DBS採取の前に必ずこの説明書をご確認ください。

対象検査：IgG食物アレルギー、ビタミンD、DNAメチレーション回路プロファイル

1

検査キットの内容



a



b



c



d



e



f



g



h



i



j



k

a. 1 ジップロック袋

b. 2 ランセット (針)

c. 1 DBS採取カード

d. 1 アルコール除菌コットン

e. 1 絆創膏

f. 1 ガーゼ

g. 1 検査申請紙と商業インボイス

h. 1 FedEx クリニカルパック

DNAメチレーション回路検査をされる場合:

i. 1 インフォームド・コンセント用紙

国際便に必要なもの:

j. FedEx Airway Bill (送付伝票)

k. FedEx プラスチック透明袋

2

採取の前に

2-4杯の水を飲んで十分な水分補給をしてください。

1. 以下の用紙にご記入をお願いします:

a. 検査申請用紙 (テストリクエスト用紙) (g)に、全ての必要事項をご記入ください

b. DBS採取カード(c)に、患者の名前と採取日をご記入ください

c. DNAメチレーション回路プロファイル検査を受ける場合のみ
→インフォームド・コンセント用紙へご署名ください。



3 手の洗淨

1. 温かい水で手を洗います
2. 血液を採取する指を決めます（中指をお勧めします）
3. アルコール除菌シートで対象の指を拭きます
4. アルコールが乾くのを待ちます



4 血液の流れを促す

1. 血液の流れをよくするために、手を15-20秒ほど下に向けてください
2. 手を温めるか、手を下向きのまま振ってください



5 ランセット（針）の使用方法

1. 検査キットのランセット**(b)**を取り出し、黄色の突起を90度ひねり、引き抜きます
2. 硬い表面に指を固定し、ランセットを指の横側に刺します（ちくっと痛みますが横側箇所は痛みが少ないようです）
3. 最初の血液はアルコール除菌シートでふき取り、血液の流れをよくするために指をさすってください



6 血液採取

1. 血液が十分に指から出てくるのを確認しましょう
2. カードの点線に十分いきわたるよう、○の中に血液を落とします。
その際、絶対にカードに指を押し付けるなどしないでください。検査ができなくなります。
3. 点線までいきわたるまで、血液を落とし続けます
血が止まってしまったら、アルコール除菌コットンで指をさすり、血液を促すか、針を使用し違う指で再度試みてください。
4. 必ず5つ全ての○に血液を点線を少しはみ出すくらいに落としてください。また、必ず裏面を確認し、同じ大きさの○に血液が染み込んでいることをご確認ください。一旦乾いた血液には、新たに血液を落とすことはしないでください。



上記がきちんと守られない場合、検査ができず、再採取をお願いする場合がございます。

（※小さいお子様で採取が難しい場合は、医師により、採血をするように腕の静脈などからとった血液をカードに染みこませたり、かかなど別の部位で採取することも可能です。）



ご質問はこちら

電話 : +1(913) 341 8949

customerservice@gpl4u.com

血液採取のポイント

採取前にお読みください


グレートプレインズ・ラボラトリーでは、全てのDBSカードが検査に耐えうるものであるかをチェックします。以下の条件に満たない場合、検査が行えず、再採取をお願いすることとなる場合があります。

<よい例>

右の図をご確認ください。点線を少しはみ出すほどに採取され、裏面もまた同じ大きさの円が染み通っています。血液がのった部分には絶対指で触れないでください。

<よくない例>

右の図をご確認ください。再採取、送り返しになってしまう例としては以下がございます。円が小さい、裏側の円まで染みとおっていない、5つ採取されていない、指でこすった跡がある、違うカードを使用した、など。

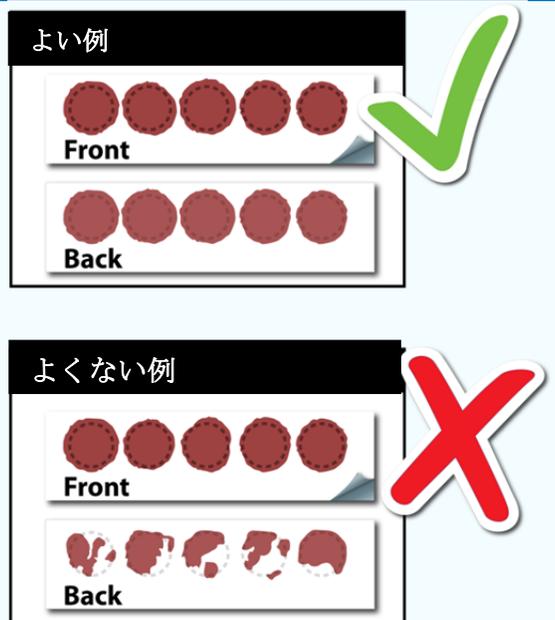

7

血液を乾燥させる

カードの血液を乾燥させるため、3-8時間ほど自然乾燥させます。血液部分には絶対に触れないでください。日光や熱には当てないようにご注意ください。乾燥後冷蔵庫に入れていただいても大丈夫です。



8

検体の発送

採取後、24-48時間以内に発送をお済ませください。血液が完全に乾いたカードをジップロック袋(a)にいれ密封します。

海外発送:

封筒の中にカードが入った袋、検査申請紙を入れ、封をします。(DNAメチレーション回路プロファイル検査をされる方は、インフォームド・コンセントの書類に必ずご署名ください)

検査キットにFedExのクリニカルパックとAir Waybillがついている場合、それを利用しての発送は0.9kg以下である限り一律\$60かかり、検査代と共に請求されます(研究所着払い扱い)。EMSや他の送付方法をご利用された方が、送料が安くなる場合がございますが、その際の送料は発送元(お客様)負担となります。

コマーシャル・インボイスは税関申請のため必要となります。必要事項を記入の上、3枚コピーし(計4枚)FedExの透明の袋に全て入れてください。裏面のシールをはがし、FedExクリニカルパックに貼り、その上にAir Waybill(送付伝票)を貼り、送付手続きを完了されてください。



ご質問はこちら

電話 : +1(913) 341 8949

customerservice@gpl4u.com

